

救命講習 実施マニュアル

準備するもの

SAMPLE

- 訓練人形（参加人数4~8名に1台程度）

- しんのすけくん（訓練人形と同数）

しんのすけくん
講習パッケージ

- 救命講習テキスト

- 講習DVD

- しんのすけくん操作マニュアル

- シチュエーション訓練用シナリオ

- テキストおよびDVDの投影機器

- しんのすけくん用端末（PC等）

- （AEDトレーナー）

講習の事前準備


SAMPLE

- 会場設営を行ってください。
- 人形にしんのすけくんをセットし、配置する。
(人形およびしんのすけくんは4~8人に1台)


講習の際の配置等は下記例を参考に行ってください

<例 20名での講習>

人形へのしんのすけくん取り付け位置

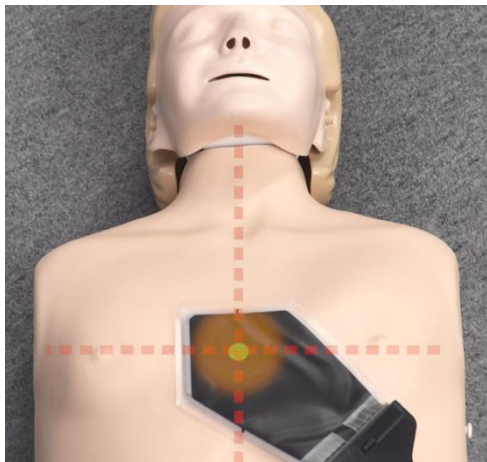

※しんのすけくんの組み立て方法については取扱説明書をご確認ください。

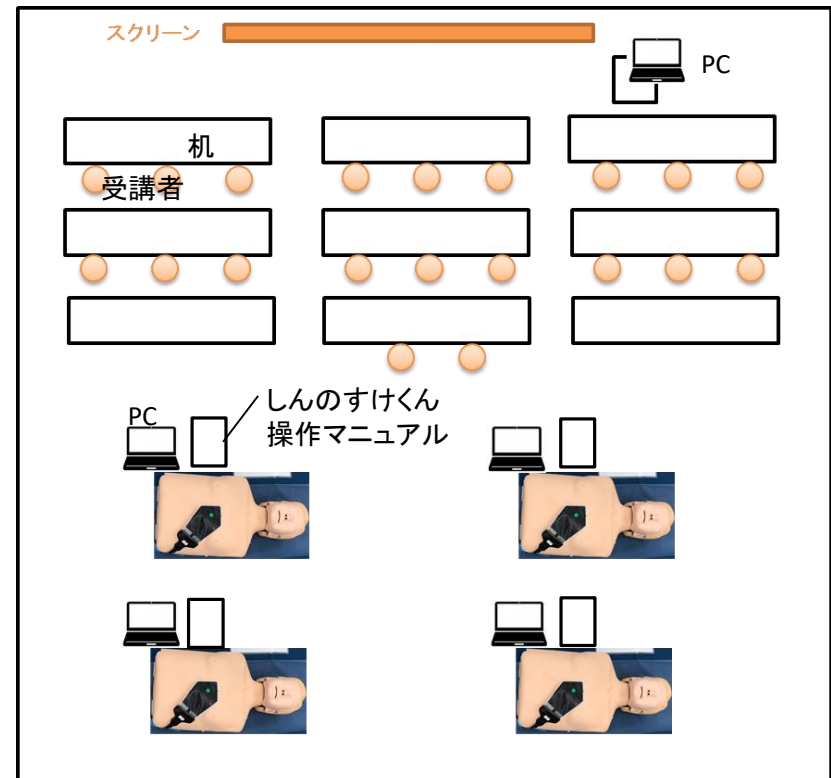

しんのすけくんの設定方法

SAMPLE

しんのすけくんソフトの設定

The screenshot shows the software interface for 'しんのすけくん' (Shinnosuke-kun) with several callouts explaining the setup steps:

- ①** インストール後、ソフトを立ち上げ、設定ボタンを押下
- ②** 設定時間を変更
胸骨圧迫訓練: 1分
シチュエーション訓練: 5分
- ③** DC設定値下限を20変更 (デフォルト設定は40) その他の項目は変更なし
- ④** お使いの人形を選択 (背景色ピンクが選択中の人形)
- ⑤** センサ裏面の認証コード (16ケタの数字)を入力
- ⑥** OKを押下し、変更を登録

The interface includes a graph showing depth over time, a '訓練設定' (Training Settings) dialog box, and a control panel with buttons for '開始' (Start) and '停止' (Stop).

項目	下限	上限	入力範囲
深さ	45	60	0.0 ~ 10.0 [cm]
リコイル	0.0	1.0	0.0 ~ 10.0 [cm]
リズム	100	120	90 ~ 130 [bpm]
DC	20	60	0 ~ 100 [%]
	60	100	0 ~ 100 [%]

CCF	有効CCF

訓練時間: 2分
認証コード: 7097 - 7801 - 0101 - 3253
累計回数: 81

※しんのすけくんを接続した端末にて個々に設定頂く必要があります。

※用途に応じて、設定を変更しても問題ありません。

講習の手順

<胸骨圧迫訓練のみ>

事前テキスト学習
実施の場合
(全体約30分～45分)

事前に 講習テキスト学習
(15分～20分程度)

当日の手順

1. 挨拶および主旨説明
2. 講習DVD再生 11分
3. 胸骨圧迫訓練
グループ人数×2分程度
4. 終わりの挨拶等

事前テキスト学習
未実施の場合
(全体約45分～60分)

当日の手順

1. 挨拶および主旨説明
2. 講習DVD再生 11分
3. 講習テキスト(動画併用版) 10分
にて補足説明
4. 胸骨圧迫訓練
グループ人数×2分程度
5. 終わりの挨拶等

講習の手順

＜一般救命講習相当＞

事前テキスト学習
実施の場合
(全体約60分～90分)

事前に 講習テキスト学習
(15分～20分程度)

当日の手順

1. 挨拶および主旨説明
2. 講習DVD再生 11分
3. 胸骨圧迫訓練
グループ人数×2分程度
4. シチュエーション訓練
説明 5分
訓練 グループ数 × 5分
5. 挨拶等

事前テキスト学習
未実施の場合
(全体約75分～100分)

当日の手順

1. 挨拶および主旨説明
2. 講習DVD再生 11分
3. 講習テキスト(動画併用版)にて補足説明 10分
4. 胸骨圧迫訓練
グループ人数×2分程度
5. シチュエーション訓練
説明 5分
訓練 グループ数 × 5分
6. 挨拶等

★続きは「[資料ダウンロードフォーム](#)」より
お問合せください。